



A CEFALY a **fej fájdalmának csillapítására** kifejlesztett ergonómikus eszköz, használata könnyű, biztonságos és rendkívül kényelmes.

A TENS fájdalomcsillapító elektroterápia már sok éve ismert és hatékonyságát tudományosan bizonyították . Ezt a fájdalomcsillapító terápiát széles körben alkalmazzák világszerte a gyógyszeres kezelésekre nem reagáló fájdalom leküzdésére .

A vezető tudományos lapok nemrégiben megjelent publikációi leírják a TENS elektroterápia hatékonyságát a fejfájás és a migrén kezelésében .

A TENS technika alkalmazása azonban nehéz és nagyon kényelmetlen volt. A CEFALY vállalta a kihívást és végül a fejfájásban és migrénben szenvedő páciensek rendelkezésére bocsátott egy hatékony elektroterápiás készüléket, egy rendkívül kényelmes, ergonómikus és használatában egyszerű eszköz formájában .

Hogyan működik

A rohamok kezelése

A koponyán belül az agyhártya fölött elhelyezkedő érzékeny, struktúrák fájdalmat gerjesztenek a fej elülső felének felszínén keresztül. A CEFALY készülék

1.programja magas frekvencia mellett stimulálja az érzékeny A β - idegszálakat, ezáltal a készülék blokkolja a fájdalomérző idegszálakat, és enyhíti a fájdalmat: ezt „kapuvezérlő” módszerként tartjuk számon.

Formájának és méretének köszönhetően a CEFALY elektródát a frontális (supraorbitális és supratrochleáris) idegek kezelésére is lehet használni. A háromosztatú ideg első ágának (Nervus ophthalmicus) teljes területe ezáltal a „kapuvezérlő” mechanizmus irányítása alá kerül. Így erőteljes fájdalomcsökkentő hatást lehet elérni migrén vagy feszültség okozta fejfájás esetén.

Megelőzés

A CEFALY készülék 2. programja alacsony frekvencia mellett stimulálja az érzékeny A δ - idegszálakat, megnövelve ezzel az endorfinszintet. Az endorfinszint növekedése csökkenti a szorongást és a stresszt, megváltoztatva a migrén és fejfájás kialakulási ingerküszöbét. A fájdalmas rohamok előfordulási gyakorisága ennél fogva csökken.

Biztonsági és hatékonysági tanulmányok

A TENS fájdalomcsillapító elektroterápia biztonságáról és hatékonyságáról a vezető tudományos szaklapok is beszámoltak . A Cefaly használatával elvégzett további klinikai kipróbálások megerősítették ezeket az eredményeket.

Biztonság

A több mint 5000 CEFALY - val történt kezelés megfigyelése során sem jegyezték fel panaszokat vagy komolyabb mellékhatásokat.

Hatékonyság és csillapítás

Több mint 80%- os javulást tapasztaltak a rohamok kezelésében és megelőzésében, és több mint 50%- os sikert értek el migrének esetében. Általánosan elmondható, hogy a páciensek 85%- a úgy nyilatkozott, hogy elégedett, illetve nagyon elégedett a készülék eredményességét illetően.

Kiemelkedő terápiás előnyök

A fájdalomcsillapítók mértéktelen használatával a feszültség okozta fejfájás krónikussá, majd hogyanem napi gyakorisággal fellépő problémává válhat. Ugyanilyen módon a migrén elleni gyógyszerek túlzott használata is hozzájárulhat egy enyhébb „módosult migrén” kialakulásához. A CEFALY így jelentős terápiás előnyt jelent, mivel nem jár mellékhatásokkal. Csökkentheti, vagy akár helyettesítheti a fájdalomcsillapító gyógyszerek fogyasztását, és visszafordíthatja a fejfájás és a migrén romlási folyamatát.

Indikációk

- **Feszítő homloktáji fejfájás**
- **Előjeleket mutató (vagy nem mutató) migrén**
- **Stressz és szorongás kezelése**
- **Halmozott fejfájás**
- **A szem herpeszvírusos megbetegedése utáni fájdalma**
- **Arcüreggyulladás (tüneti kezelés)**
- **Arcidegzsába, amely az arcideg elülső ágát érinti (Willis Nervus ophthalmicusnerve)**

Kontraindikációk és mellékhatások

- A koponyán vagy az arcon meglévő újabb keletű sérülések
- A bőr állapota (kiütések a homlok azon területén, ahová az elektródákat kell helyezni)
- Meniére szindróma (a belsőfül fül dugulás- érzéssel, heves forgó szédüléssel és fülzúgással járó megbetegedése.)
- Rövid ideig (10 perc) tartó bőrpirosodás a homlokon

Elővigyázatossági javaslat

- Ne használja vezetés közben
- Csak felnőttek és 8 évnél idősebb gyermekek használják

Használati útmutatás

- **Rohamok kezelése**

Egy vagy két húszperces kezelés egymást követően

- **Megelőzés**

Egy húszperces kezelés naponta

- **Stresszoldás**

Két vagy három húszperces kezelés hetente

CEFALY készlet

bruttó

ára:86.000.- /részletre is/

- Tartódoboz
- Részletes használati kézikönyv
- CEFALY eh. elektróda - kb . 10x használható azonos személynél
- Bőrtisztító kendő
- CEFALY készülék

külön rendelhető:

CEFALY eh.

elektróda: 6600.- /3db

ISO 9001: 2000

Medical 13485: 2003 ISO 13485

ISO 13485: 2003 CMDCAS

Gyártó: STX – Med – Science Park Liège – 4031 Angleur – Belgium



Kereskedelmi és Szolgáltató KFT.

Együtt az egészségügy jövőjéért!

FUTUREMED Kft. • 2310 SZIGETSZENTMIKLÓS • AKÁCFA
KRT. 17/B

TELEFON/FAX (24) 445-651 • MOBIL (30) 9423 - 551, üzenet: (30) 4116 - 760 •

E-MAIL futuremed@invitel.hu

www.futuremed.hu

Alapítva:1997