



Együtt az egészségügy jövőjéért!

FUTUREMED Kft. • 2310 SZIGETSZENTMIKLÓS • AKÁCFA KRT. 17/B
TELEFON/FAX (24) 445 - 651 • MOBIL (30) 9423 - 551, üzenet: (30) 4116 - 760 • E-MAIL futuremed@invitel.hu
ADÓSZÁM 12322187-2-13 • BANK: K&H Bank - 10400195-01909304-00000000
Cg. 13-09-085208 Pest megyei CgB.

AutoFuser Disposable Balloon Pump

Van egy infúzióterápiás eszköz ami, mind a kemoterápiában, fájdalomcsillapításban, anaeszteziológiában stb., tehát minden olyan téren ahol egy folyamatos és egyenletes gyógyszer applikáció szükséges, kiválóan bevethető és nem utolsó sorban, mind a beteg, mind a kezelőszemélyzet számára egyszerűbbé teszi a kezelést.

Ez az **AutoFuser**® készülék, ami az infúziós terápiák minden terén - mind a benn fekvő illetve ambulánsan kezelt betegek esetében – előnyösen alkalmazható.

Az **AutoFuser**® folyamatos üzemű szilikon-ballon infúziós pumpa egy megbízható, kifogástalanul működő készülék, ami egyedi körkörös tervezése és lapos kivitele révén széleskörű felhasználási lehetőségeket biztosít az infúziós kezeléseknél, a kemoterápia és a fájdalomcsillapítás kíséretében.

Az **AutoFuser**® tervezésekor elsődleges szempont volt a folyamatos és pontos dózis adagolása. A P.M.C. (Patient Medication Controller) az **AutoFuser**® további változata, ami szintén folyamatos áramlást biztosít, valamint lehetővé teszi a szakaszonkénti megnövelt mennyiségű hatóanyag bejuttatását egy u.n. bolusz rendszer használatával.

Biztonság

A típusonként bemért áramlási sebesség / mennyiség lehetővé teszi a pontos adagolási dózis beállítását. A programozási és kezelési hibákból eredő túladagolás veszélye kizárt.

Egyszerű használat

Az ápoló személyzet illetve szükség esetén a beteg hozzátartozói könnyen megtanulhatják a készülék kezelését. Az egységes, könnyű kivitelű **AutoFuser**® egyszerűvé teszi a gyógyszeres kezelést, a beteget nem akadályozza szabad mozgásában, nem kényszerül életvitelének nagymértékű megváltoztatására.

Gazdaságosság

A könnyen és gyorsan elsajátítható használat lerövidíti a személyzet kiképzésére szánt időt. Nincs szükség komplex nehezen kezelhető állványzatra, speciális felszerelésre. Nincs áramfogyasztás, az ambuláns illetve benn fekvő betegek kezelése technikailag egyszerűbbé válik, ami gazdasági vonatkozásban nagy előnyt jelent. Egy otthoni kezelés lehetősége sok beteg részére lehetővé teszi az infúziós medikáció igénybevételét megszokott környezetében.

A készülék felépítése

Az **AutoFuser**® egy folyamatos folyadékadagolásra tervezett ideális elrendezésű készülék. Steril és nem pyrogén.




- **Szilikon-ballon tartály**

A speciális gyógyászati célra készült szilikon nem porózus, nem repedezik, és tökéletesen tömít. Feltöltésekor rendkívül elasztikus, semmilyen körülmények között nem pattan el. A feltöltött ballomból a folyadék egyenletesen áramlik.

A típusonként változó űrtartalmuk: 100ml, 275ml, és 550ml.

A ballon központi tengelyre való felfeszítése biztosítja az állandó nyomást. A ballon volumenének csökkenését a központi tengely korrigálja, és így az kiegyenlíti volumencsökkenés által okozott nyomásvesztéséget.

TERMÉKLISTA

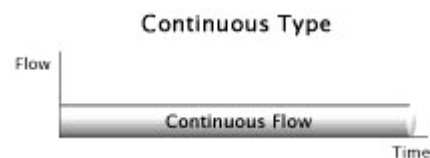

Ref. N°.	Térfogat	Áramlási adatok			Csomagolás
	(ml)	(ml/h)	(óra)	(nap)	(db/doboz)
AA1900	100	0.5	200	8	10
AA1901	100	1.0	100	4	10
AA1903	100	1.5	66	3	10
AA1902	100	2.0	50	2	10

AA1904	100	4.0	25	1	10
AA1905	100	5.0	20		10
AA1906	100	6.0	16		10
AA1910	100	10.0	10		10

Ref. N°.	Térfogat (ml)	Áramlási adatok			Csomagolás (db/doboz)
		(ml/h)	(óra)	(nap)	
AA2001	275	1.0	275	11	10
AA2003	275	1.5	183	7	10
AA2002	275	2.0	138	5	10
AA2004	275	4.0	69	3	10
AA2005	275	5.0	55	2	10
AA2008	275	8.0	34	1	10
AA2010	275	10.0	27	1	10

Ref. N°.	Térfogat (ml)	Áramlási adatok			Csomagolás (db/doboz)
		(ml/h)	(óra)	(nap)	
AA5005	550	5.0	110	5	10
AA5006	550	6.0	92	4	10
AA5008	550	8.0	69	3	10
AA5010	550	10.0	55	2	10



A felső kép baloldalán és az alsó kép felső felén lévő csuklóra szerelhető bolusz adagoló/PMC/ nem része az Ref No.:AAxxxx szériának. Külön típusok, külön is rendelhetők.